


至型椅

PRIME CHAIR

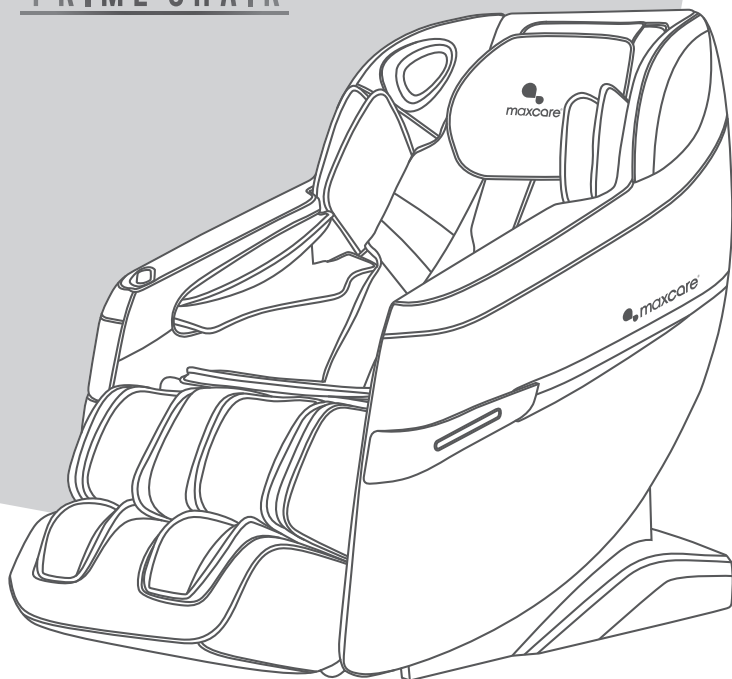

產品使用說明書

MAX-78A202S (大地灰)

MAX-78A202B (隕石黑)


maxcare®



企業介紹

maxcare 集團領導人憑著二十多年生產健康按摩產品經驗，瞭解亞洲人對按摩產品的特別需求，創立了 **maxcare** 品牌，並於2012年在香港大力拓展按摩產品市場，更於2017年獲得香港名牌殊榮。**maxcare** 以香港作為基地，專注於研發、生產及銷售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活質量」、「用心關愛家庭健康」的服務宗旨，不斷推出創新性的高品質產品。**maxcare** 產品不僅通過歐盟CE、美國UL/ETL、德國GS、TUV、中國3C等多項國際品質和安全認證，同時申報並獲得了多項國際專利。

maxcare 在集團創立者的領導下及企業使命的推動下，現已成為香港最具競爭優勢的家庭健康按摩品牌之一。**maxcare** 企業在專注於研究按摩椅技術的基礎上，融入人們對生活的全新理解——簡約、時尚的設計元素。**maxcare** 本著關愛生活的健康原則，努力致力於研發、設計、生產優質的家庭健康按摩產品，為家庭和辦公室人群提供高品質的健康按摩產品和全身全方位的健康解決方案。**maxcare** 將「無限關愛·源自點滴」的企業理念融入產品之中，將健康帶到每個人的身邊。

至型椅

PRIME CHAIR

感謝您選購 maxcare® 產品，使用前請仔細閱讀產品使用說明書，並特別注意安全事項，以便正確操作及使用本產品。

本手冊提供使用者安全及有效的操作模式，請在閱讀後妥為收藏，以便日後隨時取出參閱。

目錄

安全注意事項	P.01 - P.06
機件名稱及功能	P.07 - P.08
控制版面	P.09
使用方法	P.10 - P.29
產品的清潔、保養	P.30 - P.31
常見問題及處理方法	P.32
產品技術參數	P.33

安全注意事項



1. 重要安全警告

- 請仔細參閱本操作手冊之後再按本手冊指示使用此產品。
- 禁止將此產品用於本手冊未列出的其它用途。
- 勿使兒童及寵物接近此產品的可活動部分，以免小腿架及靠背升降時造成意外。
- 在使用過程中，使其滑動時或機器移動時，請務必確認周圍（產品的後、下部、前部及兩旁）沒有人或寵物，亦請確認無異物或寵物進入產品內，以免造成意外。
- 請使用與此產品匹配的電源。
- 用後或清潔前請拔離電源插頭，以免造成設備或人身損害。
- 不可使用未推薦的配件及附件。
- 請勿在室外使用此產品。
- 身體潮濕時禁止使用此產品。
- 建議使用時間為20分鐘。
- 使用前，請檢查機件是否破損，如有破損請立即停止使用，請聯絡本公司來修理。
- 蓋套布破損或損壞時不得使用此產品。
- 請勿在此產品外殼或外套破損的情況下使用。
- 請勿使任何物品落入此產品內。
- 使用此產品過程中不可睡覺。
- 醉酒或感覺不適時請勿使用此產品。
- 請勿在進餐之後一小時內使用此產品。
- 使用此產品時請勿過分用力，以免受傷。
- 不在褲子口袋裡裝著硬物的情況下使用。
- 電源插頭上附著針、垃圾或水份時不可使用。
- 電源線破損時，請勿私自拆卸更換，應聯絡本公司更換修理。



2. 使用環境

- 請勿在高度潮濕的環境如浴室中使用此產品。
- 在環境溫度急劇變化時請勿立即使用此產品。
- 請勿在灰塵嚴重或有腐蝕性氣體空間環境中使用此產品。
- 請勿在狹小空間或空氣流通不暢處使用此產品。
- 使用完畢後請關閉電源，拔掉電源插頭。
- 請勿在室溫高於40°C的環境下使用本產品。
- 請勿在室溫低於5°C的環境下使用產品，因為潤滑油的稠化可能會加大機器齒輪傳動件的磨損，影響使用壽命。
- 請勿在雷擊時使用，並將電源插頭拔離電源插座。
- 請將產品放置在平坦的地方使用。
- 請勿於室外使用。
- 請勿將產品放置在靠近火爐或陽光直射的地方。
- 如產品由低溫儲存處移到溫暖環境使用時，內部金屬機件可能會聚集水氣而影響產品的正常運作，甚至造成機器損壞，建議移動後將產品在正常室溫放置一小時後再開機使用。



3. 如有以下症狀，請先諮詢醫生，在醫生指導下方可使用

- 骨質疏鬆症患者。
- 患有惡性腫瘤、急性疾病、心臟病、嚴重高血壓等患者。
- 有腰痛者或者過去腿、腰、頸曾經受過傷者。腿、腰、頸和手麻木者（有椎間盤突出、脊椎滑落症、頸椎突出等疾病者）。
- 有變形性關節炎、風濕症、痛風者。
- 呼吸器官有障礙者。
- 有血栓症或嚴重的動脈瘤，急性靜脈瘤等血液迴圈障礙或各種皮膚感染等症狀者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢迴圈障礙所引起的知覺障礙者。
- 背骨有異常或者背骨彎曲者。
- 明顯身體狀況不佳者。
- 具有心臟問題以及佩戴電子醫療器如心臟起搏器者。
- 發高燒者。
- 孕婦或經期婦女。
- 身體有創傷或體表患病者。

安全注意事項

- 無人監管時十四歲以下兒童及神志不清者禁止使用本產品。
- 經醫生囑咐需要休養或感覺身體不適者。
- 產品有發熱功能，對熱不敏感的人使用時必須注意。
- 正在接受醫生治療者，特別是身體感到異常者。
- 皮膚有創傷者。
- 以康復為目的者。



4. 安全事項

- 請勿在產品上放置重物。
- 請勿在使用本機的同時使用其它治療儀器。
- 請勿用於治療目的。
- 本產品僅限一人使用，請勿兩人或以上同時使用。
- 建議每次使用本產品20分鐘內為宜。
- 產品下可放置一張墊子以防地板或地毯受損。
- 為安全起見，使用時讓產品和他人至少保持0.5米距離。
- 檢查電壓是否符合此產品的規格要求。
- 請勿使用濕手拔插電源插頭。
- 勿使水進入此產品內，避免觸電或使此產品受損。
- 插拔電源插頭時切勿拉扯電源線，不可過於粗暴。
- 切勿使電線受損或更改此產品電路。
- 切勿用濕布清潔此產品電源開關、插頭等可帶電部位。
- 如果發生停電應該離開此產品，以免電力突然恢復時導致傷害。
- 如果在使用中感到此產品異常請立即停止使用，並向本公司諮詢。
- 如果您在使用此產品期間感到身體異常請立即停止使用，並向醫生諮詢。
- 本產品不提供給身體有殘障、感觀或神經有缺陷或缺乏經驗與常識的人士（包括兒童）使用，除非他們得到那些對他們的安全負責的人員關於如何使用該產品的監督與指導。
- 兒童必須被監督以確保他們不會拿產品來玩耍。
- 如果電源線損壞，為了避免危險，必須由本公司更換。
- 請勿騎在產品扶手上，以免導致受傷或故障。
- 不要將電源線靠近熱的或運動的物體。
- 移動前必須切斷電源，拔掉插頭。
- 如果發現產品損壞、破裂、漏電及相關部位暴露出來時禁止使用。



5. 產品保養和維護

- 本產品只能由本公司維修。用戶不可自行拆卸或修理。
- 請記住在使用後關閉總電源開關。
- 電源插座鬆動時，切勿使用此產品。
- 若長期不用應將此產品電源線卷起。並把此產品貯存在乾燥無塵的環境中。
- 切勿將此產品貯存在高溫或明火附近。勿使陽光長期直射。
- 請用乾布清潔此產品。不可使用稀釋劑、苯或酒精。
- 本產品機械裝置經特別設計與製造，無需特別維護。
- 不可用尖銳物品刺向此產品。
- 在不平整地面上勿使此產品滾動或拖動，需抬起後搬移。
- 請間歇使用，不應使此產品長期連續運轉。




6. 常見現象處理

- 運行中發出電機聲：屬正常運作聲音。
- 遙控器無法正常運作：檢查電源插頭與電源插座連接是否可靠；檢查電源開關是否打開。
- 本產品運作停止：額定時間到，此產品自動啟動關閉按鍵；此產品連續工作時間過長，溫控保護開關自動關機，可讓此產品休息半小時後再使用。




注意


在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及手控器連接線。

 安全注意事項 警告

按摩椅工作躺倒時小腿上升，人不得對小腿施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成產品損壞或人身傷害。

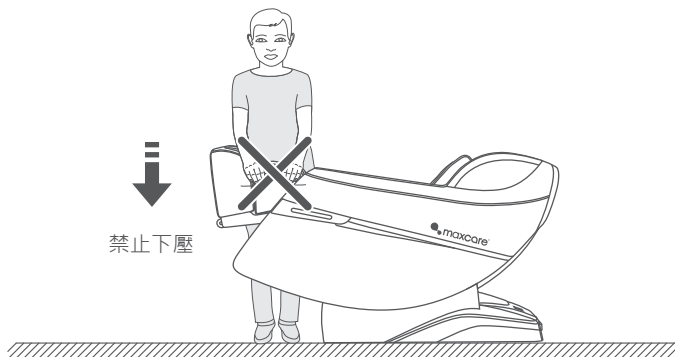
 警告

在坐上按摩椅之前需確認按摩機械手不能停留在坐墊位置，以免人體重力下壓過程中對臀部造成不適，以及造成按摩機械手損壞。

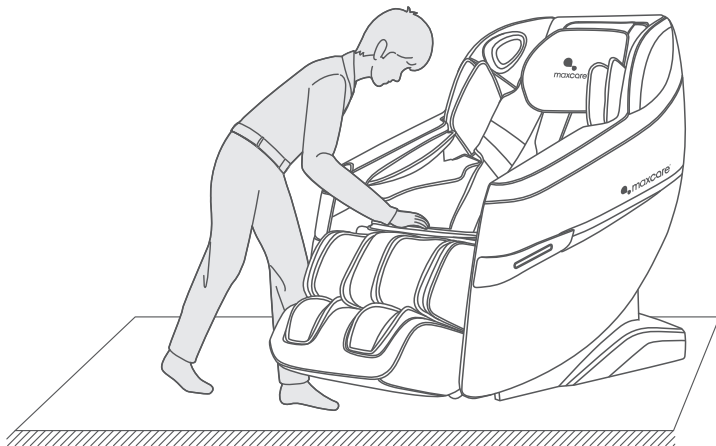



 安全注意事項 警告

在待機或者已接通電源狀態下，請勿讓兒童拆拉電源線，如用力強行拆拉導致電源線連接線插頭內側插針損壞，會造成產品損壞或身體意外觸電；建議在不使按摩椅時拔下電源線收納起來。

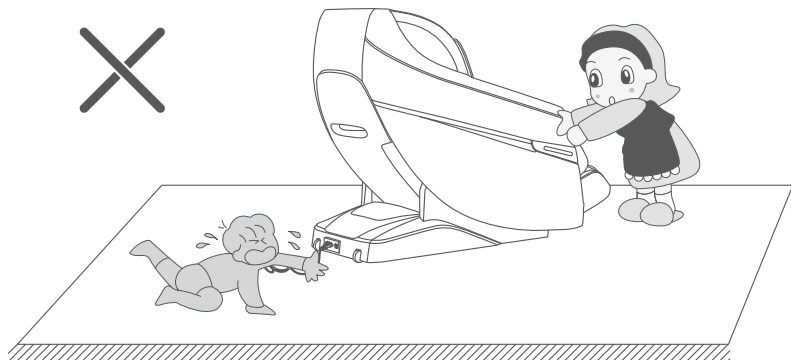
 警告

在開啟零重力躺臥功能時，務必留意小腿底部和靠背下是否有兒童和寵物在按摩椅下逗留或者是玩耍，否則產品會一直壓下去，會造成產品損壞和人身傷害。

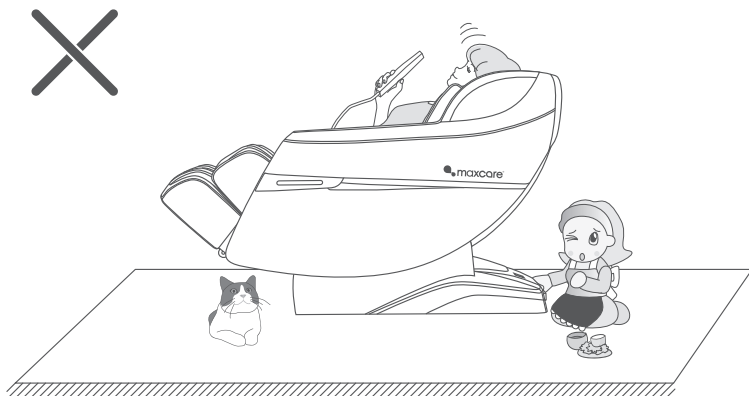



 安全注意事項 警告

使用按摩椅之前, 請先將衣袋內的硬物或者隨身攜帶的首飾品取下後再進行按摩 (如: 鑰匙、手錶等等隨身硬物), 以避免在按摩過程中對造成產品損壞或人身傷害。

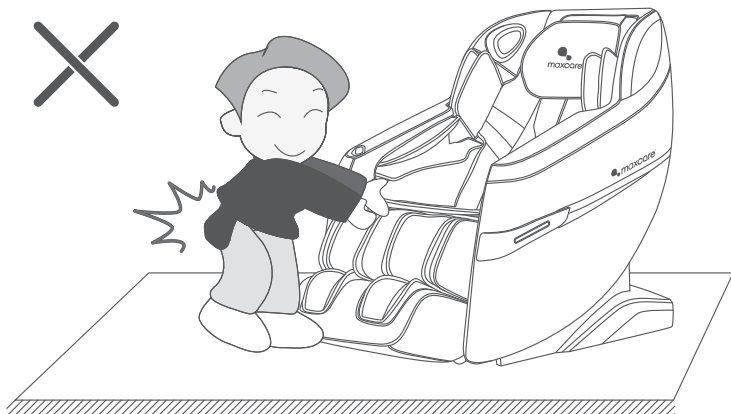
 警告

在按摩過程中請勿拔掉電源線, 或者直接關閉按摩椅後面的電源開關, 以避免造成產品損壞或人身傷害。

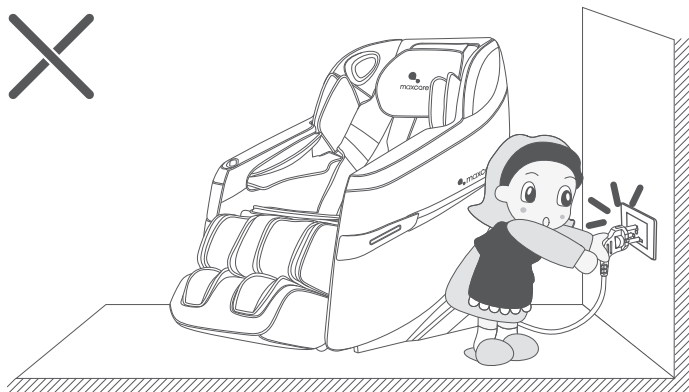


 安全注意事項 警告



請不要在使用按摩椅過程中，在按摩椅上睡著，以避免在無意識中使用造成人身傷害。

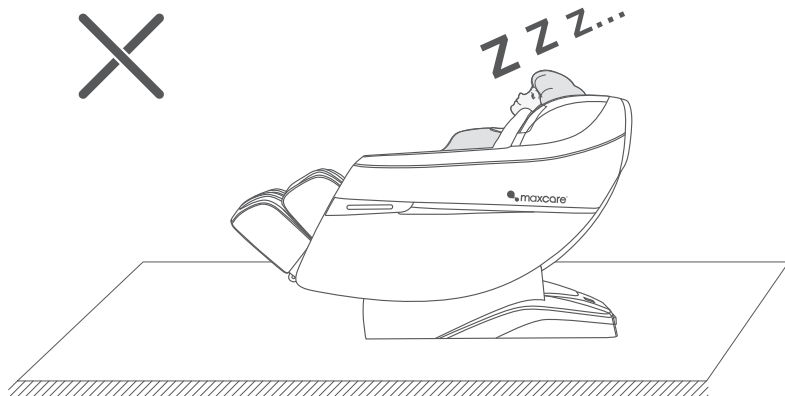 警告

使用按摩椅時請不要超過兩人，以避免導致產品故障或人身傷害，此外，請勿讓兒童在按摩椅上玩耍，或者爬到小腿、座墊、腳部、靠背或扶手上，否則可能會引起事故或造成傷害。

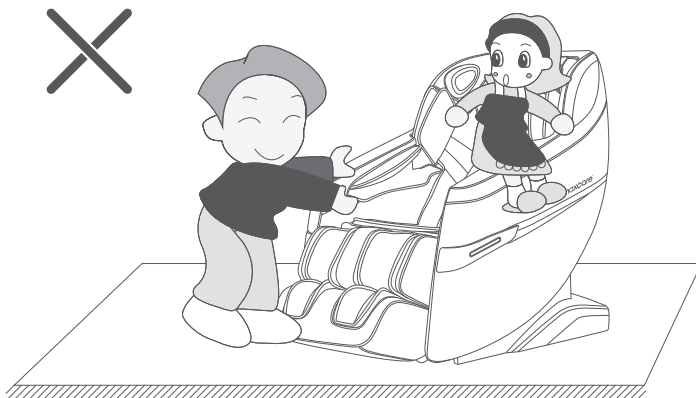

機件名稱及功能

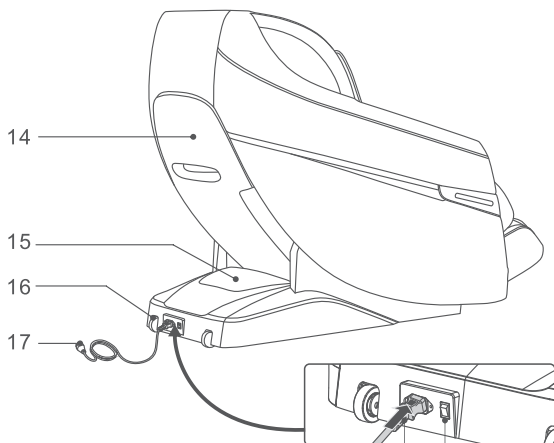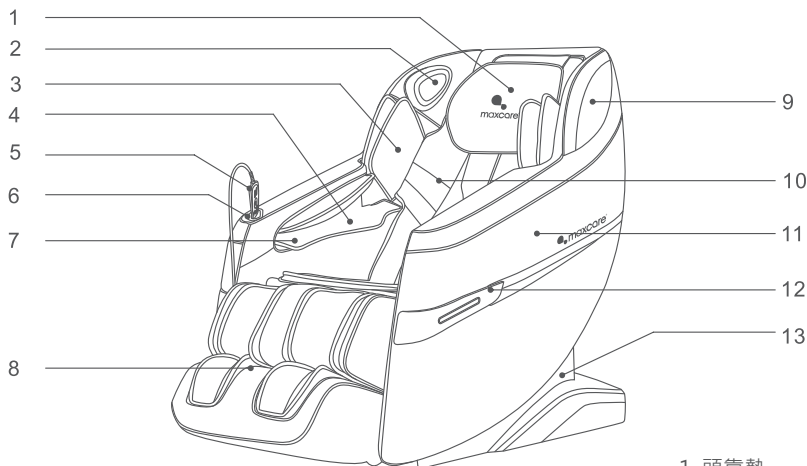

1. 頭靠墊
2. 藍牙數字音響
3. 上手臂氣壓組件
4. 手臂氣壓組件
5. 控制器
6. 控制器放置架
7. 凸點按摩帶及磁療
8. 小腿架
9. 上扶手裝飾
10. 靠背墊
11. 扶手
12. 扶手裝飾條
13. 側罩
14. 靠背蓋
15. 電源箱蓋
16. 移動滑輪
17. 電源線與插頭
18. 電源線插口
19. 電源開關

18 19


機件名稱及功能



功能特點：

- 本產品設計了一組能上下行走、前後伸縮、靜音設計的3D智能按摩機械手。
- 肩部位置自動檢測及微調節功能，以及人體曲線和按摩指壓點自動檢測功能，根據檢測到的人體曲線和按摩指壓點自動調節機械手前後伸縮量，使按摩更具人性化和科學性。
- 設有自動按摩模式：酸痛改善、肩頸呵護、塑形美臀、全身牽引、活力早晨、推拿熱療、辦公養生、脊柱按摩、午後充電、輕鬆活力、輕鬆放鬆、舒適安睡、泰式拉筋、運動復原及全身保健，15種自動按摩模式。
- 設有三種智能儲存功能：儲存1、儲存2、儲存3。
- 設有全身手動按摩功能：定點、局部、上背、下背、全背五個按摩部位選擇。
- 設有手動按摩功能：有揉捏、拍打、揉捏拍打、敲擊、指壓、3D (3D I、3D II)，等七種按摩手法選擇。
- 設有按摩調節功能：3D強度3檔調節、氣壓強度3檔調節、時間4檔調節，等三種按摩調節功能選擇。
- 設有上半身氣壓按摩功能：手掌氣壓按摩功能 (內置4個氣囊)、肩部氣壓按摩功能 (內置4個氣囊)、手臂氣壓按摩功能 (內置4個氣囊)，3檔氣壓強度調節。
- 設有下半身氣壓按摩功能：小腿氣壓按摩功能 (內置12個氣囊)，3檔氣壓強度調節。
- 靠背架下躺採用滑軌技術，使靠背離牆為8厘米，最大限度節約空間。
- 靠背架導軌採用SL型超長曲線軌道貼合人體，完全貼合人體背部曲線，從頭部至大腿都能享受貼身按摩。
- 在左右手掌氣囊袋中設有凸點按摩及磁療功能。
- 設有背部加熱、小腿加熱功能：採用遠紅外熱源。
- 音樂播放系統，按摩椅肩部位置左右各設一個3D數字音響。可利用智慧設備的藍牙功能，進行無線連接播放音樂。
- 設有腿部牽引按摩功能：利用小腿和靠背升降形成自動躺臥，並且自動循環躺臥。同時小腿氣壓、背部機械手同時配合按摩，腿部進行拉伸牽引按摩。
- 設有小腿架單獨升降調節功能、靠背架聯動升降調節功能、零重力自動躺臥角度調節功能。
- 設有足部足底滾輪按摩功能，三組滾輪滾動對腳趾、腳根刮痧按摩，對腳弓處滾動式刮痧按摩，速度3檔調節。
- 小腿架設有彈簧伸縮功能，足部伸出長度是根據使用者腿長而定，足部收縮靠彈簧力縮回。
- 關機自動起坐功能及機械手自動復位功能。
- 配置TFT彩色顯示屏搖控器。

控制版面

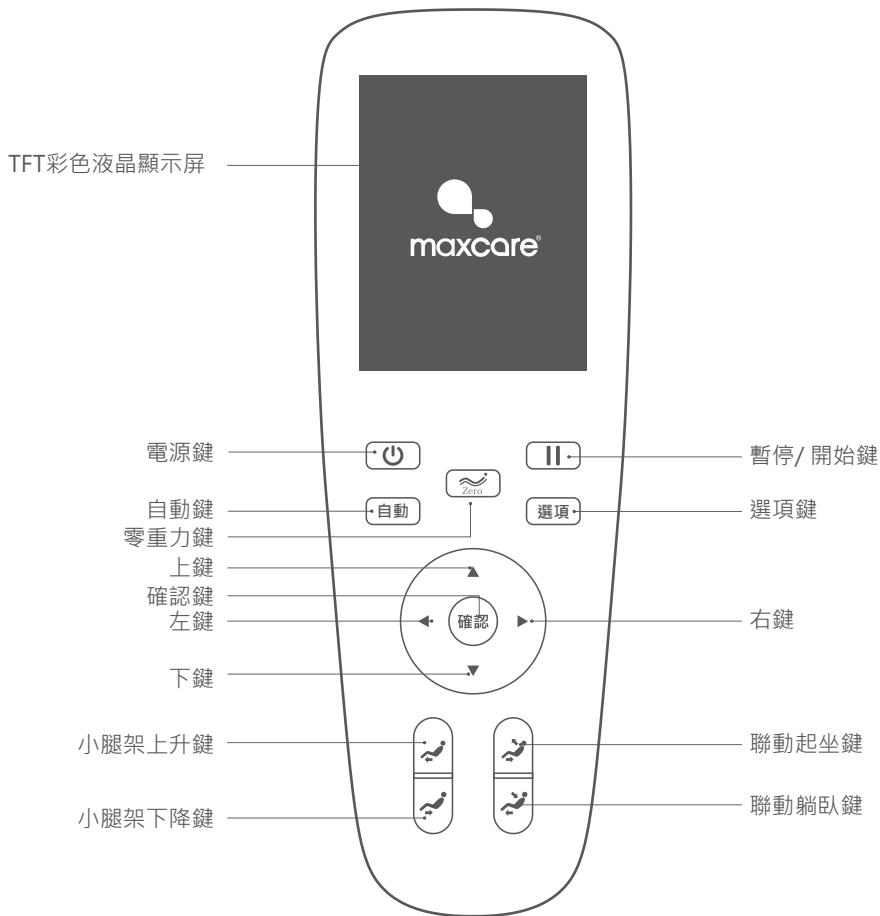


注：具體顯示以實物為準!


⚙️ 使用方法

⚠️ 一. 接通整機電源


① 接通電源示意圖

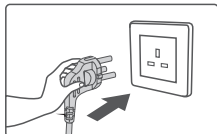

② 整機連線示意圖

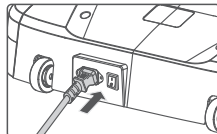


③ 整機電源開關示意圖

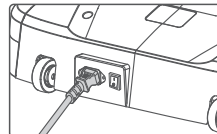

🚶 二. 開始按摩


1. 按下電源開關鍵，啟動按摩，靠背架和小腿架自動躺臥到設定的角度。
2. 自動躺臥到位後，按摩椅自動進行人體肩位置和體型檢測，等待檢測完成。或者按“確認鍵”，直接跳過肩位置和體型檢測，則直接開啟默認值開始按摩。

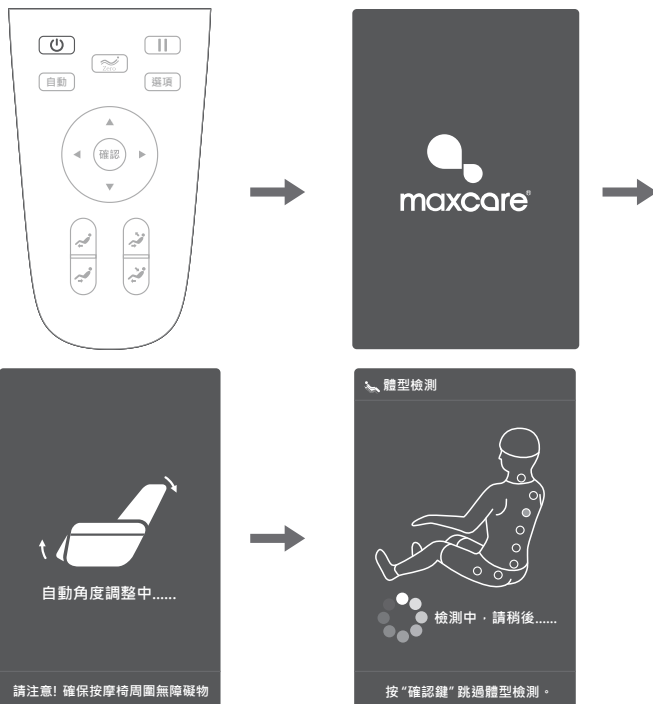

使用方式


1. 肩位置調整

檢測到肩位置後，蜂鳴器提示“滴滴”，若與實際肩位置有偏差，可以透過“上鍵”或者“下鍵”調整到合適位置。肩位置共11檔可調。在10秒內沒有肩位置調整，則自動進入按摩功能。如直接按“確認鍵”則立即進入按摩。若檢測不到肩位置，則默認肩位置高度進行按摩。

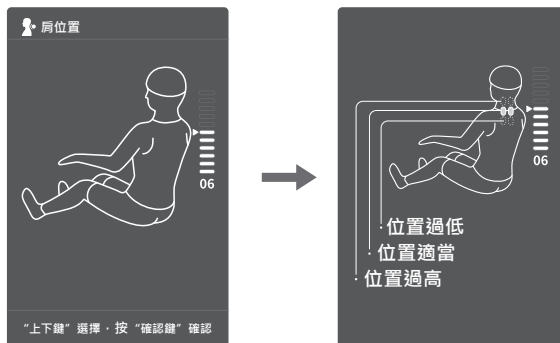

名稱	按鍵	描述
上/下鍵		向上調整按摩球位置，使其到達合適的肩部位置。 向下調整按摩球位置，使其到達合適的肩部位置。

進入按摩程式後，如需要調整肩部調節，在運行狀態信息界面下，可直接選擇肩部調節按鈕進入肩部調節界面，通過“上鍵”或“下鍵”調整肩部位置高度，按“左鍵”返回到上一級菜單界面。

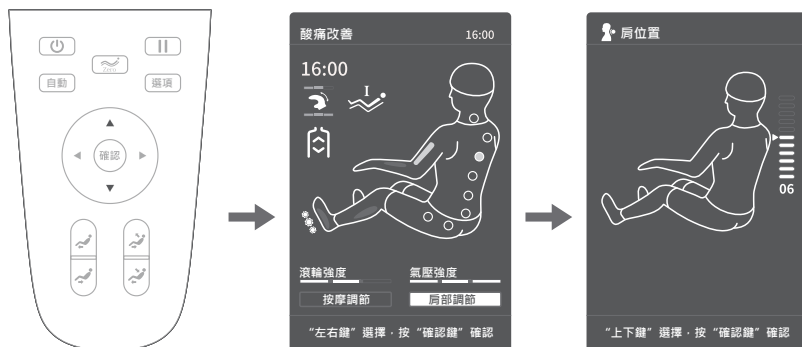

使用 方法

2. 按摩位置調整

進入按摩程式後，如果需要進行按摩位置調整，按搖控器上的“選項鍵”，選擇手動程式進入，選擇手動程式，然後按“左鍵”返回到信息界面(信息界面轉為手動程式界面)。在手動程式界面下，若按摩位置顯示定點或局部，可直接按“上鍵”或“下鍵”對機械手進行上下移動調整。


在手動程式界面下，若按摩位置顯示不是定點或局部，選擇定點或局部，然後再按“左鍵”返回到信息界面，再按“上鍵”或“下鍵”可對機械手進行上下移動調整。



注：在自動程式時，不能通過“上鍵”或“下鍵”進行機械手上下移動調節。

3. 暫停鍵

在按摩功能運行時，按“暫停鍵”則暫時停止所有按摩功能，再次按“暫停鍵”則按摩功能繼續運行暫停前的按摩功能。如果暫停時間超過20分鐘，則所有按摩功能自動關閉。

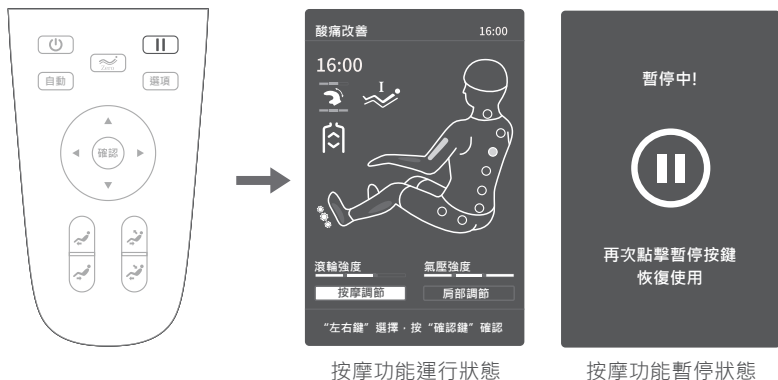


使用 方法

4. 選項鍵

按“選項鍵”進入選項按摩功能選擇界面，包括自動程式、手動程式、氣壓按摩、輔助功能、記憶存儲、設置功能等功能界面。

進入選項界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇需要的按摩功能，選擇任意一種功能後，然後按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。

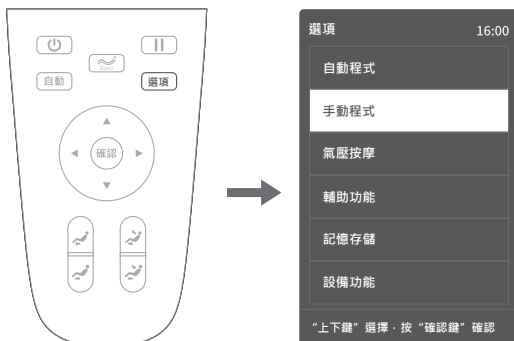

A)、自動按摩：(選項 – 自動程式，也可以通過“自動鍵”進入自動程式界面)

- 按“選項鍵”進入選項界面，按“上鍵”或者“下鍵”選擇自動功能，按“確認鍵” (或者在信息界面直接按“自動鍵”)進入自動功能的選擇。

- 自動功能包括：酸痛改善、肩頸呵護、塑形美臀、全身牽引、活力早晨、推拿熱療、辦公養生、脊柱按摩、午後充電、輕鬆活力、輕鬆放鬆、舒適安睡、泰式拉筋、運動復原及全身保健，15種自動按摩模式。

- 進入自動功能界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種自動功能按摩程式後，按“確認鍵”確認，並會自動回到信息界面，並且信息界面顯示為自動功能的信息界面。



 使用方法

功能	描述
酸痛改善	舒緩全身疲勞酸痛，四肢得到放鬆改善微循環，舒緩關節酸痛，恢復活力。
肩頸呵護	針對肩部和頸部的獨特按摩手法，有助於促進血液循環，緩解頸肩酸痛，改善腦部供血。
塑形美臀	針對臀部和大腿的有效按摩，使身體塑形，減少多餘脂肪的堆積。
全身牽引	開啟肩部氣囊，靠背慢慢下滑，同時腿部氣囊和足底滾輪開啟，小腿架慢慢下降，機械手按摩至腰部（氣囊機械手充放氣），慢慢的一充一放按摩腰部。開啟手臂氣囊，機械手以拍打手法從腰部到大腿，再從大腿按摩至肩頸。循環動作。
活力早晨	按摩機械手從肩頸部慢慢下滑至腰部，再用揉拍手法，從腰部按摩至肩頸部。再從肩頸部用拍打、敲擊按摩手法一直按摩至腰部，重覆來回。
推拿熱療	針對肩頸配合肩部氣囊進行揉捏按摩，背及腰部進行揉拍按摩，臀部進行揉捏、大腿進行揉拍按摩，同時開啟足底滾輪和腿部及手臂氣囊進行同步按摩。開啟背部和腿部熱療。
辦公養生	針對久坐辦公室的情況，通過按摩增加身體的運動量，改善機體功能。
脊柱按摩	呵護脊椎健康，針對運動量不足進行改善。
午後充電	機械手、氣囊、滾輪各種按摩方式同時進行，配搭自選的藍牙音樂，放鬆身心壓力。
輕鬆活力	輕柔舒適的深度按摩，舒緩身體疲勞，放鬆身體。
輕鬆放鬆	最舒適的按摩體驗。
舒適安睡	以揉捏、指壓的按摩手法，配合低強度的氣壓按摩，對十二大養生穴位按摩幫助身體調理平衡；同時按摩椅自動來回擺動形成零重力搖籃式按摩狀態，使人快速入睡，改善睡眠，提升睡眠質量。
泰式拉筋	使用泰式按摩手法，針對身體進行拉伸，全面緩解身體疲勞及酸痛。
運動復原	通過氣囊按壓、揉搓，滾輪滾刮，舒緩運動、健身後肩部、手臂、膝蓋、小腿肚等重點部位的酸脹，迅速恢復運動後的身體疲勞。
全身保健	針對經絡進行疏通，快速改善身體微循環，提升免疫力。

使用方式

B)、手動按摩：(選項 - 手動程式)

- 按“選項鍵”進入選項界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇手動程式，按“確認鍵”進入手動功能界面。
- 手動程式：包括手法、部位、寬度、速度等按摩功能。
- 進入手動程式界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種手動程式後，通過“右鍵”進行對該項功能子選項選擇，然後按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



(i) 手動程式 - 手法

- 手法：包括揉捏、拍打、揉捏拍打、指壓、敲擊、3D(3DI、3DII)等7種不同的按摩手法。在拍打、指壓、敲擊、3DII按摩手法狀態下，機械手按摩球寬度可調。除停止外的其他按摩手法狀態下按摩速度均可調。
- 進入手動程式界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇手法功能，通過“右鍵”進入手法子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種按摩手法，按“確認鍵”確認，按“左鍵”返回到上一級菜單項界面。



使用方法

功能	按摩球調整	
停止	寬度	3檔速度可調整 3檔寬度可調整
揉捏	速度	
拍打	速度、寬度	
揉捏拍打	速度	
指壓	寬度	
敲擊	速度、寬度	
3D I	速度	
3D II	速度、寬度	

(ii) 手動程式 – 部位

- 部位：包括定點、局部、上背、下背、全背。
- 進入手動程式界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇部位功能，通過“右鍵”進入部位功能的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種按摩部位，按“確認鍵”確認，按“左鍵”返回到上一級選項界面。



功能	描述	
定點	定點位置定點按摩。	在選擇定點和局部按摩手法時，可以在信息界面狀態下通過“上鍵”和“下鍵”調整按摩區域。
局部	小範圍局部往返按摩。	
上背	上背往返按摩。	
下背	下背往返按摩。	
全背	全背往返按摩。	

使用方法

(iii) 手動程式 - 寬度

- 寬度：機械手按摩寬度調整，共3檔。
- 進入手動程式界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇寬度功能，通過“右鍵”進入寬度功能的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種按摩寬度，按“確認鍵”確認，按“左鍵”返回到上一級選項界面。



注：寬度：在拍打、指壓、敲擊、3D II狀態下，寬度可以調整，共3檔。

(iv) 手動程式 - 速度

- 速度：機械手按摩速度快慢調整，共3檔。
- 進入手動程式界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇速度，通過“右鍵”進入速度功能的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種按摩速度，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



使用方法

C) 氣壓按摩：(選項 - 氣壓按摩)

- 按“選項鍵”進入選項界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇氣壓按摩，按“確認鍵”進入氣壓按摩界面。
- 氣壓按摩：包括上身氣壓、下身氣壓、氣壓強度等按摩功能。
- 進入氣壓按摩界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種氣壓按摩後，通過“右鍵”進行對該項功能子選項選擇，然後按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



(i) 氣壓按摩 - 上身氣壓

- 上身氣壓：包括手掌氣壓、手臂氣壓和肩部氣壓等按摩功能。
- 進入氣壓按摩界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇上身氣壓按摩功能後，通過“右鍵”進入上身氣壓的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇開啟或關閉上身氣壓功能，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



使用方法

(ii) 氣壓按摩 - 下身氣壓

- 下身氣壓：包括腿部氣壓、腳部氣壓等氣壓按摩功能。
- 進入氣壓按摩界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇下身氣壓按摩功能後，通過“右鍵”進入下身氣壓的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇開啟或關閉下身氣壓功能，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



(iii) 氣壓按摩 - 氣壓強度


- 氣壓強度：強度3檔可調。
- 進入氣壓按摩界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇氣壓強度，通過“右鍵”進入氣壓強度的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種氣壓強度檔位，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



使用方法

D) 輔助功能：(選項 - 輔助功能)

- 按“選項鍵”進入選項界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇輔助功能，按“確認鍵”進入輔助功能界面。
- 輔助功能：包括足底滾輪、背部加熱、小腿加熱等按摩功能。
- 進入輔助功能界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種按摩功能後，通過“右鍵”進行對該項功能子選項選擇，然後按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。

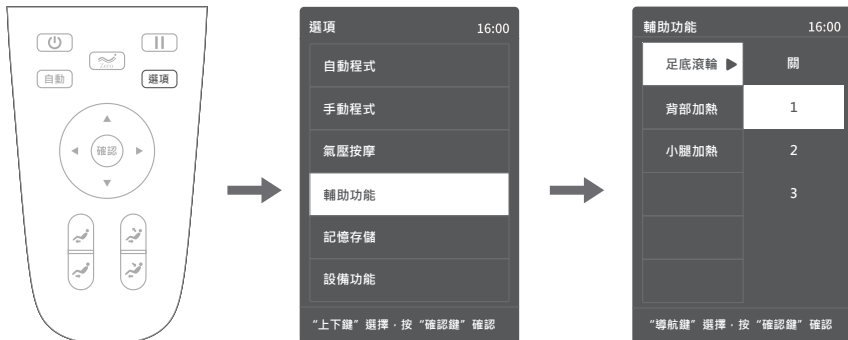

(i) 輔助功能 - 足底滾輪

- 足底滾輪：共設有關閉、1檔、2檔、3檔，4種狀態可調，開機默認為2檔。
- 進入輔助功能界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇足底滾輪按摩功能，通過“右鍵”進入足底滾輪的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種滾輪強度及開關選擇，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



使用方法

(ii) 輔助功能 - 背部加熱

- 背部加熱：開啟熱療功能3分鐘後有溫熱。


- 進入輔助功能界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇背部加熱功能，通過“右鍵”進入背部加熱的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇開啟或關閉，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。



(iii) 輔助功能 - 小腿加熱

- 小腿加熱：開啟熱療功能3分鐘後有溫熱。

- 進入輔助功能界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇小腿加熱功能，通過“右鍵”進入小腿加熱的子選項選擇，然後再按“上鍵”或“下鍵”選擇開啟或關閉，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。

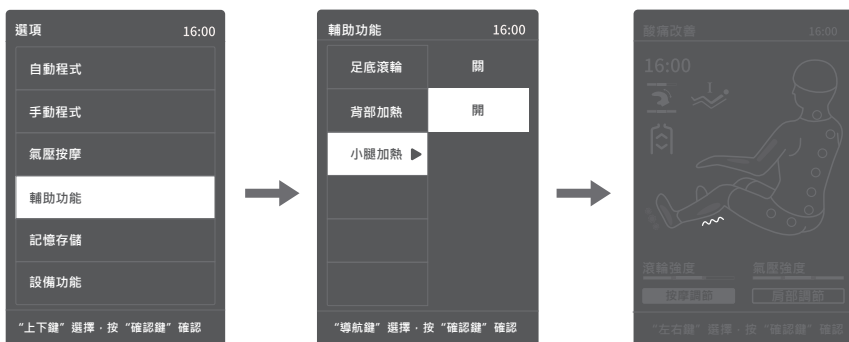

使用方法

E) 記憶存儲：(選項 - 記憶存儲)

- 按“選項鍵”進入選項界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇記憶存儲功能，按“確認鍵”進入記憶存儲功能界面，包括：存儲調用、存儲保存等存儲功能。
- 記憶存儲包括：存儲1、存儲2、存儲3等3種功能。
- 進入記憶存儲界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇存儲1、存儲2、存儲3中的任意一種存儲功能後，通過“右鍵”進入存儲或調用的子選項選擇，然後按“上鍵”或“下鍵”選擇，按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。
- 存儲：存儲當前運行的按摩程式，包括按摩手法、氣壓模式以及強度，小腿架和靠背架位置角度以及其他按摩功能。
- 調用：調用以前保存的按摩程式，包括按摩模式、按摩手法、氣壓模式以及強度，小腿架和靠背架位置角度以及其他按摩功能。



F) 設置功能：(選項 - 設置功能)

- 按“選項鍵”進入菜單界面，按“上鍵”或“下鍵”選擇設置功能，按“確認鍵”進入設置功能界面。
- 設置功能：藍牙、語言、序列號等設置功能。
- 進入設置功能界面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇任意一種設置功能後，通過“右鍵”進行對該項功能的子選項選擇，然後再按“確認鍵”確認。按“左鍵”返回到上一級選項界面。

使用方法



(i) 設置功能 - 藍牙

- 藍牙: 開啟按摩椅藍牙功能即可連接有藍牙功能的智能設備 (如手機、平板電腦等)。與按摩椅的藍牙模式進行配對連接後, 可把智能設備播放的音樂通過藍牙無線傳送到按摩以音響系統進行播放。
- 進入設置功能介面後, 按“上鍵”或“下鍵”選擇藍牙功能, 通過“右鍵”進入藍牙功能的子選項選擇, 然後按“上鍵”或“下鍵”選擇開啟或關閉藍牙功能, 按確認鍵確認; “左鍵”回到上一個選項介面。



(ii) 設置功能 - 語言

- 語言: 包括繁體中文、英文等語言設置。
- 進入設置功能介面後, 按“上鍵”或“下鍵”選擇語言功能, 通過“右鍵”進入語言功能的子選項選擇, 然後按“上鍵”或“下鍵”選擇語言, 按確認鍵確認; “左鍵”回到上一個選項介面。

使用方法



按摩調節


- 於信息介面按“左鍵”或“右鍵”選擇按摩調節，按確認鍵進入按摩調節介面。
- 按摩調節包括：3D強度、氣壓強度、時間調節等三種按摩調節功能選擇。
- 進入按摩調節介面後，按“上鍵”或“下鍵”選擇一種按摩調節功能，通過“右鍵”進入按摩調節能的可選項選擇，然後按“上鍵”或“下鍵”選擇所要的檔位，按確認鍵確認；“左鍵”回到上一個選項介面。

功能	描述
3D強度	頸、背、腰、臀部按摩強度調整，共3檔強度可選。
氣壓強度	共3檔強度可選。
時間調節	+10分鐘、+5分鐘、-5分鐘、-10分鐘，共4個選項。

注意：


- 根據剩餘的按摩時間而定，當顯示的時間不足以進行某項時間的加減操作時，該項操作則不會顯示（時間顯示上限為40分鐘）。例如：手控器顯示時間為39分鐘，則按摩時間調整的範圍為：-5分鐘、-10分鐘（無法顯示進行+10分鐘、+5分鐘）。
- 其中氣壓強度的調整只有在開啟氣壓功能或自動功能狀態下才可使用（開啟氣壓功能方式詳情請參閱此說明書第18頁）。

使用方法

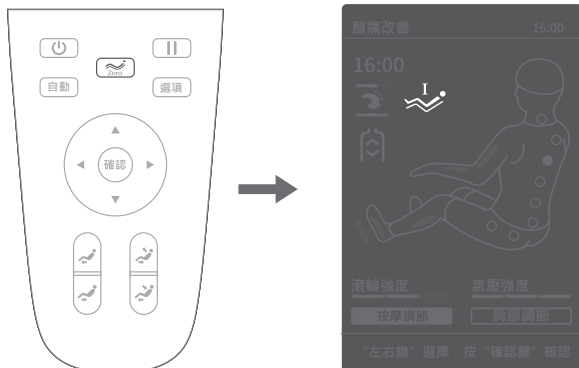





零重力鍵

- 按零重力鍵調整零重力位置，可根據自己需求選擇零重力I、零重力II、零重力III位置。

按鍵	描述
	零重力鍵：每按一次鍵，自動調整小腿架和靠背架位置到零重力位置，共三種零重力躺臥模式，循環切換。


躺臥角度調整鍵

按鍵	描述
	小腿架上升鍵：按住此鍵小腿架慢慢上升，釋放則停止上升。
	小腿架下降鍵：按住此鍵小腿架慢慢下降，釋放則停止下降。
	聯動起坐鍵：按住此鍵靠背架慢慢上升，同時小腳架慢慢下降，釋放則停止移動。
	聯動躺臥鍵：按住此鍵靠背架慢慢下降，同時小腳架慢慢上升，釋放則停止移動。

使用方式


H) 結束按摩

- 在按摩過程中，按下電源開關鍵，立即關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架復位；
- 按摩指定時間到，按摩自動關閉所有按摩功能，靠背架和小腿架不復位。

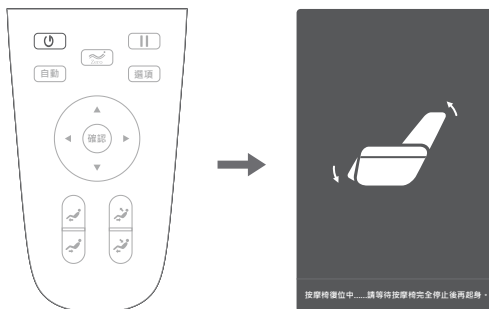


- 切斷整機電源，附圖（整機電源切斷示意圖）。


1 關閉整機電源示意圖

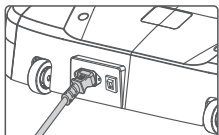

2 拔掉整機連線示意圖

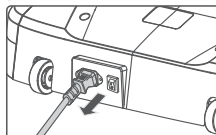

3 拔掉電源插頭示意圖

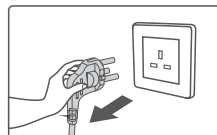


I) 藍牙音響播放操作說明

1. 進入智能設備主選項，打開“設置”，選擇“藍牙”，選項打開“藍牙”。藍牙自動“搜索新的藍牙設備”備進行搜索。
2. 智能設備將搜索到相應的藍牙型號(如：IMCM-XXXX)，點擊配對按鈕，如詢問是否與該設備配對，選擇“配對”即可完成配對。
3. 打開智能設備的音樂播放器，選擇歌曲進行播放。

使用方式


三、頭部靠墊、靠背墊的拆裝與使用

使用頭部靠墊可減少頸肩部揉捏按摩的力度，可根據您的需要決定是否使用頭部靠墊（推薦使用頭部靠墊）。靠背墊與靠背通過拉鍊連接(1)，頭部靠墊與靠背墊通過拉鍊連接(2)。

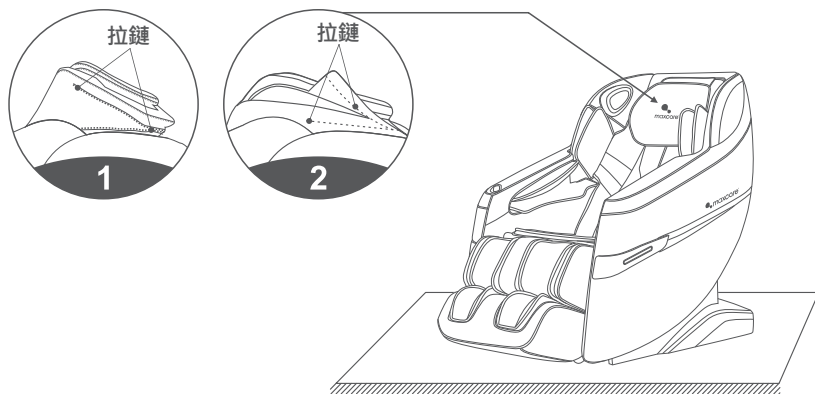

四、地板保護


按摩椅經長時間的重壓，可能會使地板起傷痕，可以在按摩椅擺放處墊一張地毯或其它緩衝介質，可以避免這種情況。

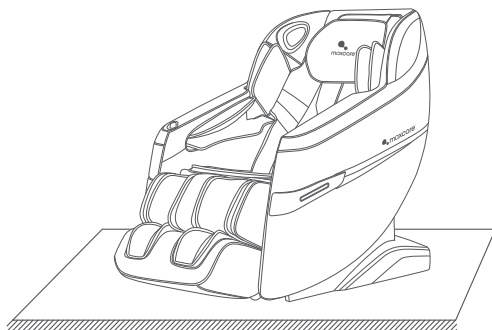

注意：在不平的地面上及空間較小的地方請勿使用滑輪移動本機，如要移動，必須要兩人以上合作抬動，在抬動時以小腿擋封板及靠背蓋凹槽處為著力點（請勿直接抬動扶手）。

 使用方法 五、移動方法

確定所有電線拔離按摩椅後，靠背向下壓到一定的角度（重心落在滑輪上時），即可用手扶著按摩椅向前推動，移動到合適的位置後將按摩椅輕扶放回正常角度。（注意：在移動時務必先關閉電源開關再拔掉電源線及遙控器連接線）。

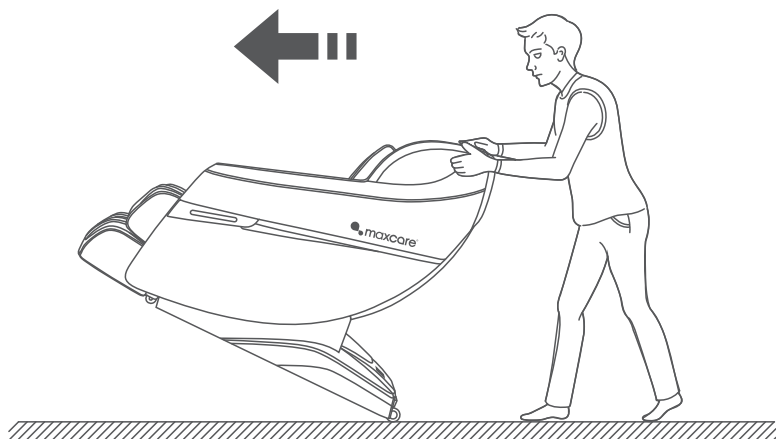


警告

按摩椅後面的移動滑輪只適合短距離慢速推動，如進行長距離的搬運，請使用其它輔助移動工具移動此按摩椅！


⚙️ 使用方法

👤 六、小腿安裝說明

- 將小腿和按摩椅上的氣管與線束相連後，再解開固定管線帶，將連接部分塞進座架內(圖1)。
- 將小腿固定塊套在小腿的左右兩側圓管上(圖2)。

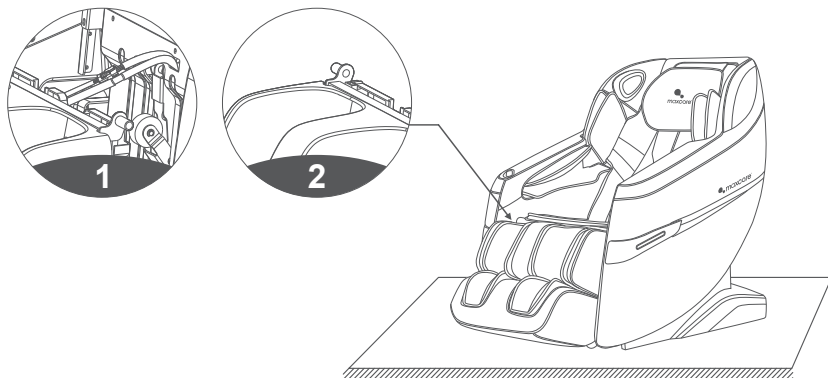

- 將套上固定塊的小腿掛在按摩椅座架掛鉤上(圖3)。
- 再用4顆(左右各兩顆)M4螺釘將小腿緊固在按摩椅上，檢查上下翻動有無異常，管線有無折住現象，小腿安裝完成(圖4)。

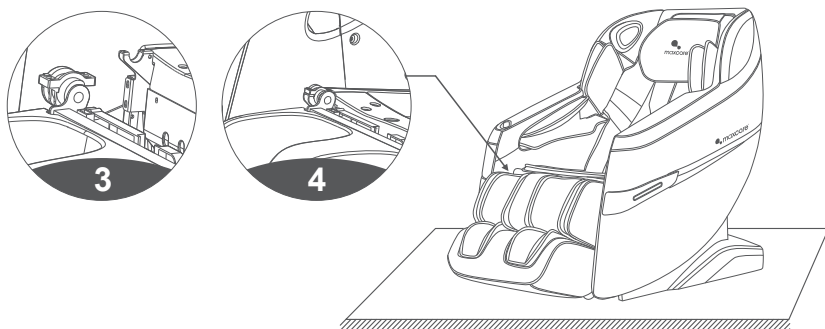

 產品的清潔、保養

清潔

- 清潔之前，請確認電源開關已經關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 產品和控制面板的表面請用柔軟的布進行擦拭清潔。



注意

- 切勿濕手拔插電源插頭。
- 切勿用水沖洗產品，或將水或其它液體弄到產品內部。
- 切勿使用苯或稀釋劑等具有腐蝕性的清潔劑來清潔產品，否則可能會造成產品褪色，產品結構受到腐蝕、開裂。
- 產品潮濕時，請勿拆卸或使用產品，讓產品自然乾燥即可。

保養

- 確認電源開關關閉，電源線插頭已經從插座拔出。
- 請保持產品清潔並遠離高濕度或高溫的場所以及有揮發性氣體的環境。
- 如果長時間不使用產品，請用防塵罩（請自行購買）套住產品，防止落入灰塵。



注意

- 切勿將產品放置於陽光直接照射或高溫的場所，以免造成產品褪色及機件損壞。

溫馨提示

- 長年使用時，請務必檢查是否有以下症狀：
 - * 有焦糊氣味。
 - * 觸動導線後有時通電，有時斷電。
 - * 電源線發熱。
 - * 電源線是否破損。
 - * 其它異常。



注意

- 如有上述現象，為防止故障和事故的發生，請停止使用產品。
- 切斷電源開關，拔下電源插頭，並與本公司聯絡。
- 切勿私自拆卸修理。

PU合成皮革的保養及清潔

Pu合成皮革是由聚氨酯樹脂經塗布、烘乾、熟成而製成。它與真皮相比較有較好的耐酸鹼、耐熱、耐日光照射等屬性，但由其本身物性及化學性質決定，應避免放置在有灰塵、高溫、高濕、低溫、強光照射及含酸鹼劑液的環境中，否則易使其龜裂，加速老化與水解。

PU合成皮革的清潔方法與注意事項：

1. 不可使用有機試劑和油脂溶液及化合物，特別是強溶劑。如：酒精、松節油、天拿水等清潔PU表面，否則易腐蝕PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易產生裂紋；
3. 應選用酸鹼值：即PH值=5~7範圍，不含磨擦劑，不污染環境的清潔劑清潔PU表面；
4. 對於較髒的PU表面以軟布沾蛋清擦試污垢，避免用刷子清潔；


PU合成皮革的保養方法與注意事項：

1. 要保證居室內的通風，過於乾燥或潮濕都會加速皮革的老化；
2. 皮革沙發不要放在陽光能直射到的地方，也不要放在空調直接吹到的地方，否則會使皮面變硬。陽光直射會使有色的皮面褪色；
3. 夏季人體多汗，皮革的孔隙會吸收汗液，高溫潮濕會使汗中的有機物與皮革發生化學反應，易產生異味。對此，要勤用帶微濕的柔布擦拭；
4. 在擦沙發時，不能用鹼性清洗液。因為在制皮時是酸性處理，而鹼性會使皮革柔軟性下降，長期使用會發生皸裂。

❓ 常見問題及處理方法

序號	現象	可能原因	處理方法
1	動作中出現『咻咻』、『嗒嗒』的聲音	產品正常工作時發出的聲音或按摩球與布套之間摩擦的聲音	無需任何處理
2	無法開機	適配器接頭未連接好	連接好接頭
		電源開/關未開	開啟電源開/關
		電源插頭沒有插好	插好插頭
3	突然停止操作	斷電	連接好接頭
		按摩時間超過20分鐘·自動關機	開啟電源開/關
		連續使用時間過長·產品過熱保護	插好插頭
		施力過大·按摩球堵轉	放鬆·減輕機器負荷

如果進行了上述處理還有異常現象·請與本公司聯絡。

 產品技術與參數

產品名稱	: 至型椅
產品型號	: MAX-78A202S (大地灰) MAX-78A202B (隕石黑)
額定電壓	: 220-240V ~50/60Hz
額定功率	: 90W
額定時間	: 20分鐘
噪音	: ≤55dB
產品毛重	: 88KGS
產品淨重	: 70KGS
氣壓	: 0.025-0.03MPa
產品直立尺寸	: 137CM*74CM*107CM
產品展開尺寸	: 158CM*74CM*93CM
靠背最大承重	: 90KGS
小腿架最大承重	: 30KGS
安全結構	: Class I
材質	: 革 真皮 布料 木
材料說明	: PVC、PA、鋼件及電氣電子元器件
執行標準	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008