


傾心椅

Adore Chair

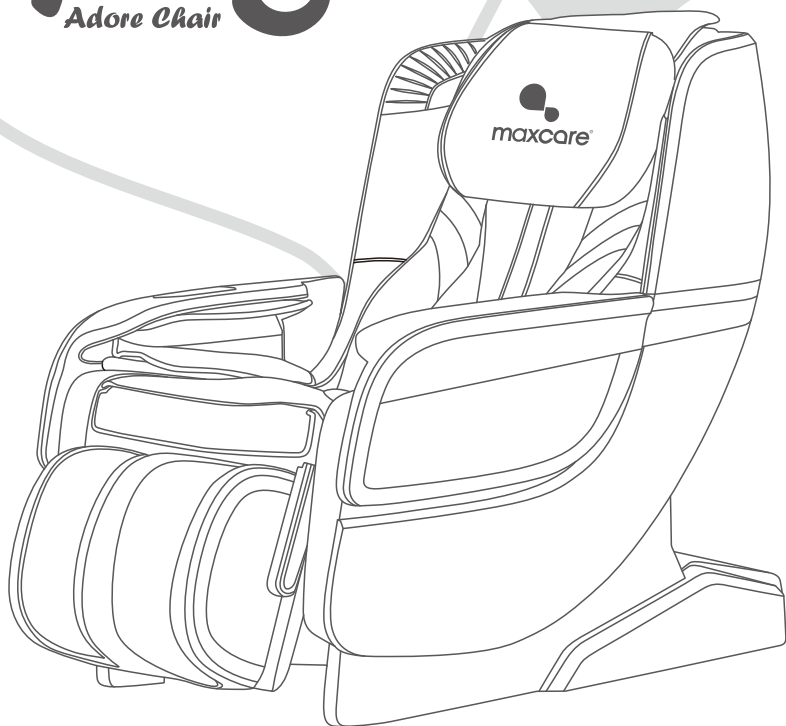

產品使用說明書

MAX-78A161



maxcare®



企业介绍

maxcare 集团领导人凭着二十多年生产健康按摩产品经验，了解亚洲人对按摩产品的特别需求，创立了maxcare 品牌，并于2012年在香港大力拓展按摩产品市场，更于2017年获得香港名牌殊荣。maxcare 以香港作为基地，专注于研发、生产及销售家庭健康器械。

maxcare 秉持「科技提升生活质量」、「用心关爱家庭健康」的服务宗旨，不断推出创新性的高品质产品，maxcare 产品不仅通过欧盟CE、美国UL/ETL、德国GS、TUV、中国3C等多项国际品质和安全认证，同时申报并获得了多项国际专利。

maxcare 在集团创立者的领导下及企业使命的推动下，现已成为香港最具竞争优势的家庭健康按摩品牌之一。maxcare 企业在专注于研究按摩椅技术的基础上，融入人们对生活的全新理解——简约、时尚的设计元素。maxcare 本着关爱生活的健康原则，努力致力于研发、设计、生产优质的家庭健康按摩产品，为家庭和办公室人群提供高品质的健康按摩产品和全身全方位的健康解决方案。maxcare 将「无限关爱，源自点滴」的企业理念融入产品之中，将健康带到每个人的身边。

傾心椅

Adore Chair

感谢您选购 maxcare® 产品，使用前请仔细阅读产品使用说明书，并特别注意安全事项，以便正确操作及使用本产品。

本手册提供使用者安全及有效的操作模式，请在阅读后妥为收藏，以便日后随时取出参阅。

目录

安全注意事项	P.01 - P.05
机件名称及功能	P.06 - P.07
控制版面	P.08
使用方法	P.09 - P.12
产品的清洁、保养	P.13 - P.14
常见问题及处理方法	P.14
产品技术参数	P.15

安全注意事项



1. 重要安全警告

- 请仔细阅读本操作手册之后再按本手册指示使用此产品。
- 禁止将此产品用于本手册未列出的其它用途。
- 勿使儿童及宠物接近此产品的可活动部分，以免小腿架及靠背升降时造成意外。
- 在使用过程中、使其滑动时或机器移动时，请务必确认周围（产品的后、下部、前部及两旁）没有人或宠物，亦请确认无异物或宠物进入产品内，以免造成意外。
- 请使用与此产品匹配的电源。
- 用后或清洁前请拔离电源插头，以免造成设备或人身损害。
- 不可使用未推荐的配件及附件。
- 请勿在室外使用此产品。
- 建议使用时间为20分钟。
- 使用前，请检查机件是否破损，如有破损请立即停止使用，请联络本公司来修理。
- 盖套布破损或损坏时不得使用此产品。
- 请勿在此产品外壳或外套破损的情况下使用。
- 请勿使任何物品落入此产品内。
- 使用此产品过程中不可睡觉。
- 醉酒或感觉不适时请勿使用此产品。
- 请勿在进餐之后一小时内使用此产品。
- 使用此产品时请勿过分用力，以免受伤。
- 不在裤子口袋里装着硬物的情况下使用。
- 电源插头上附着针、垃圾或水份时不可使用。
- 电源线破损时，请勿私自拆卸更换，应联络本公司更换修理。



2. 使用环境

- 请勿在高度潮湿的环境如浴室中使用此产品。
- 在环境温度急剧变化时请勿立即使用此产品。
- 请勿在灰尘严重或有腐蚀性气体空间环境中使用此产品。
- 请勿在狭小空间或空气流通不畅处使用此产品。
- 使用完毕后请关闭电源，拔掉电源插头。
- 请勿在室温高于40°C的环境下使用本产品。
- 请勿在室温低于5°C的环境下使用产品，因为润滑油的稠化可能会加大机器齿轮传动件的磨损，影响使用寿命。
- 请勿在雷击时使用，并将电源插头拔离电源插座。
- 请将产品放置在平坦的地方使用。
- 请勿于室外使用。
- 请勿将产品放置在靠近火炉或阳光直射的地方。
- 如产品由低温储存处移到温暖环境使用时，内部金属机件可能会聚集水气而影响产品的正常运作，甚至造成机器损坏，建议移动后将产品在正常室温放置一小时后再开机使用。



3. 如有以下症状，请先咨询医生，在医生指导下方可使用

- 骨质疏松症患者。
- 患有恶性肿瘤、急性疾病、心脏病、严重高血压等患者。
- 有腰痛者或者过去腿、腰、颈曾经受过伤者。腿、腰、颈和手麻木者（有椎间盘突出、脊椎滑落症、颈椎突出等疾病者）。
- 有变形性关节炎、风湿症、痛风者。
- 呼吸器官有障碍者。
- 有血栓症或严重的动脉瘤，急性静脉瘤等血液回圈障碍或各种皮肤感染等症状者。
- 有因糖尿病等引起的高度末梢回圈障碍所引起的知觉障碍者。
- 背骨有异常或者背骨弯曲者。
- 明显身体状况不佳者。
- 具有心脏问题以及佩戴电子医疗器如心脏起搏器者。
- 发高烧者。
- 孕妇或经期妇女。
- 身体有创伤或体表患病者。
- 无人监管时十四岁以下儿童及神志不清者禁止使用本产品。

安全注意事项

- 经医生嘱咐需要休养或感觉身体不适者。
- 身体潮湿时禁止使用此产品。
- 产品有发热功能，对热不敏感的人使用时必须注意。
- 正在接受医生治疗者，特别是身体感到异常者。
- 皮肤有创伤者。
- 以康复为目的者。

4. 安全事项

- 请勿在产品上放置重物。
- 请勿在使用本机的同时使用其它治疗仪器。
- 请勿用于治疗目的。
- 本产品仅限一人使用，请勿两人或以上同时使用。
- 建议每次使用本产品20分钟内为宜。
- 产品下可放置一张垫子以防地板或地毯受损。
- 为安全起见，使用时让产品和他人至少保持0.5米距离。
- 检查电压是否符合此产品的规格要求。
- 请勿使用湿手拔插电源插头。
- 勿使水进入此产品内，避免触电或使此产品受损。
- 插拔电源插头时切勿拉拽电源线，不可过于粗暴。
- 切勿使电线受损或更改此产品电路。
- 切勿用湿布清洁此产品电源开关、插头等可带电部位。
- 如果发生停电应该离开此产品，以免电力突然恢复时导致伤害。
- 如果在使用中感到此产品异常请立即停止使用，并向本公司咨询。
- 如果您在使用此产品期间感到身体异常请立即停止使用，并向医生咨询。
- 本产品不提供给身体有残障、感观或神经有缺陷或缺乏经验与常识的人士（包括儿童）使用，除非他们得到那些对他们的安全负责的人员关于如何使用该产品的监督与指导。
- 儿童必须被监督以确保他们不会拿产品来玩耍。
- 如果电源线损坏，为了避免危险，必须由本公司更换。
- 请勿骑在产品扶手上，以免导致受伤或故障。
- 不要将电源线靠近热的或运动的物体。
- 移动前必须切断电源，拔掉插头。
- 如果发现产品损坏、破裂、漏电及相关部位暴露出来时禁止使用。

5. 产品保养和维护


- 本产品只能由本公司维修。用户不可自行拆卸或修理。
- 请记住在使用后关闭总电源开关。
- 电源插座松动时，切勿使用此产品。
- 若长期不用应将此产品电源线卷起。并把此产品贮存在干燥无尘的环境中。
- 切勿将此产品贮存在高温或明火附近。勿使阳光长期直射。
- 请用干布清洁此产品。不可使用稀释剂、苯或酒精。
- 本产品机械装置经特别设计与制造，无需特别维护。
- 不可用尖锐物品刺向此产品。
- 在不平整地面上勿使此产品滚动或拖动，需抬起后搬移。
- 请问歇使用，不应使此产品长期连续运转。

6. 常见现象处理


- 运行中发出电机声：属正常运作声音。
- 遥控器无法正常运作：检查电源插头与电源插座连接是否可靠；检查电源开关是否打开。
- 本产品运作停止：额定时间到，此产品自动启动关闭按键；此产品连续工作时间过长，温控保护开关自动关机，可让此产品休息半小时后再使用。




在移动时务必先关闭电源开关再拔掉电源线及手控器连接线。


 安全注意事项 警告

按摩椅工作躺倒时小腿上升，人不得对小腿施加重力，防止按摩椅前倒，以避免造成产品损坏或人身伤害。

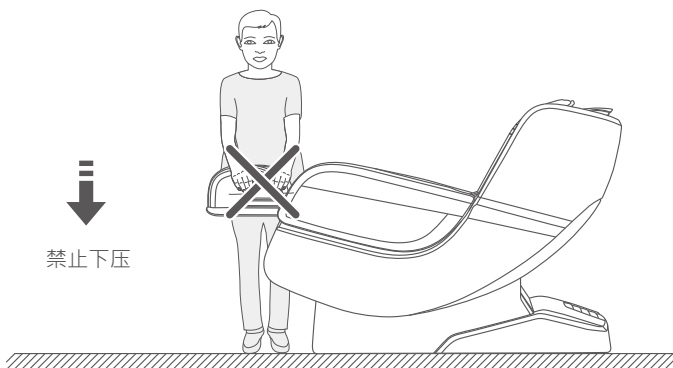
 警告

在坐上按摩椅之前需确认按摩机械手是否停留在坐垫位置，以免人体重力下压过程中对臀部造成不适，以及造成按摩机械手损坏。

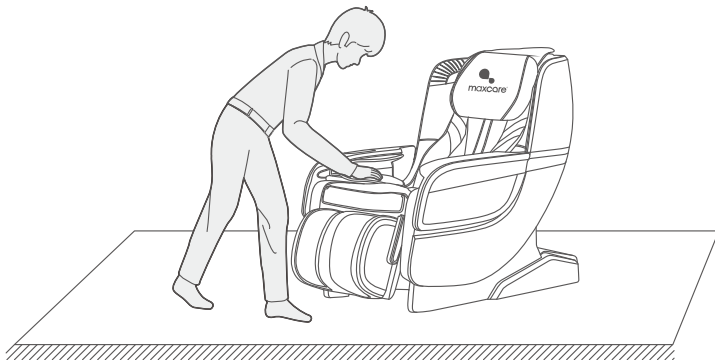



 安全注意事项 警告

在待机或者已接通电源状态下，请勿让儿童拆拉电源线，如用力强行拆拉导致电源线连接线插头内侧插针损坏，会造成产品损坏或身体意外触电；建议在不用按摩椅时拔下电源线收纳起来。

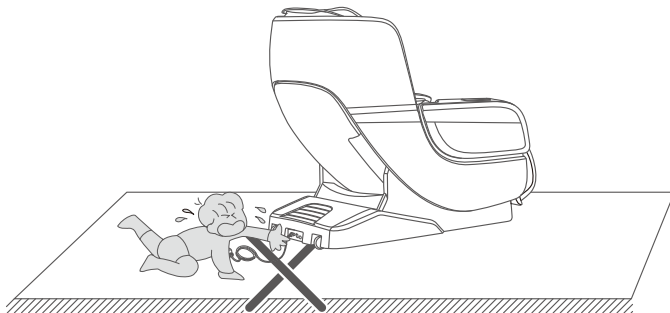
 警告

在开启零重力躺卧功能时，务必留意小腿底部和靠背下是否有儿童和宠物在按摩椅下逗留或者是玩耍，否则产品会一直压下去，会造成产品损坏和人身伤害。

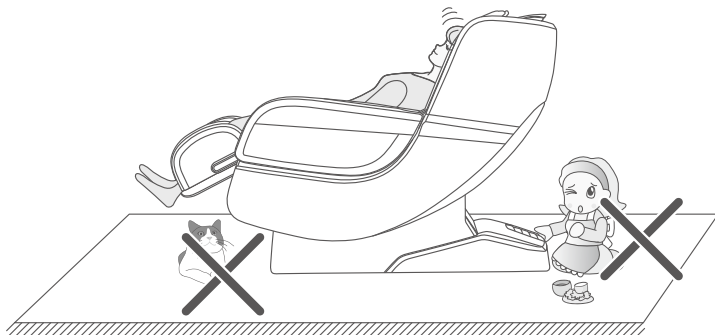


 安全注意事项 警告



椅子较轻，严禁儿童攀爬或踩跳等高危动作，否则会导致产品侧翻摔倒风险，以避免造成产品损坏或人身伤害。

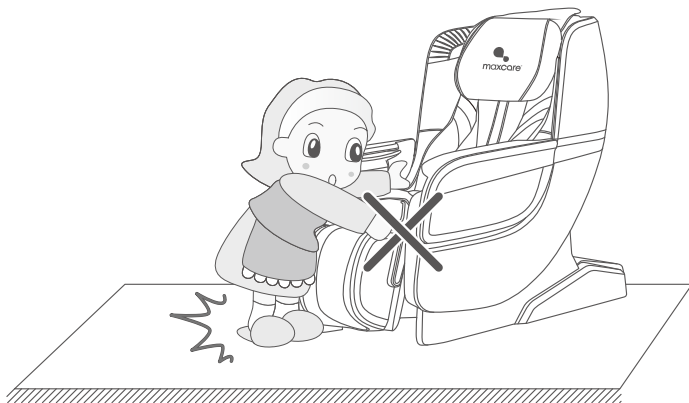 警告

将按摩椅扶手向上旋转后（将扶手的上部分向上旋转），在按摩过程中或按摩结束后，将扶手旋转回位时切勿将手（如：儿童玩耍时将手放在此处）、硬物、钥匙、手表、衣物等等随身物品放在扶手回位的缝隙处，同时按摩结束后必须将扶手旋转回位，以避免造成产品损坏或人身伤害。

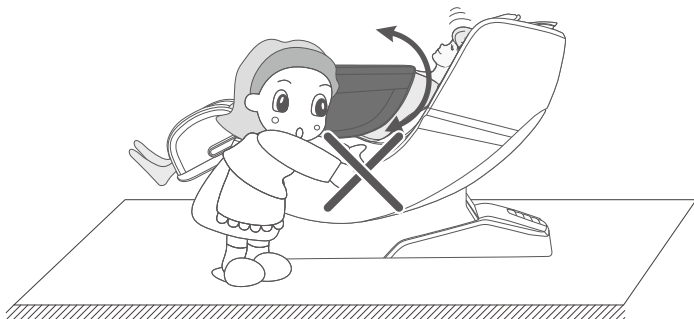

机件名称及功能

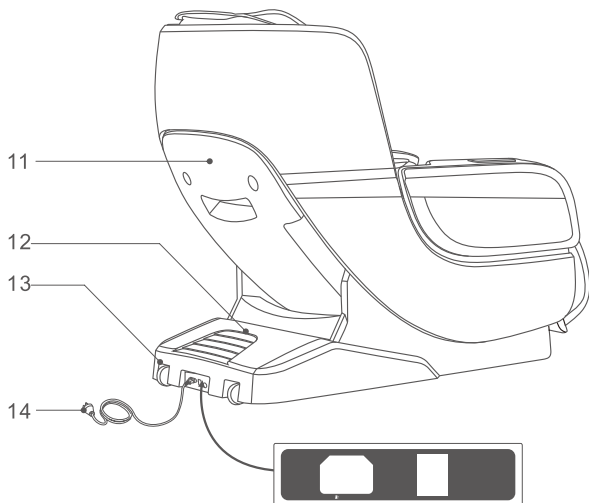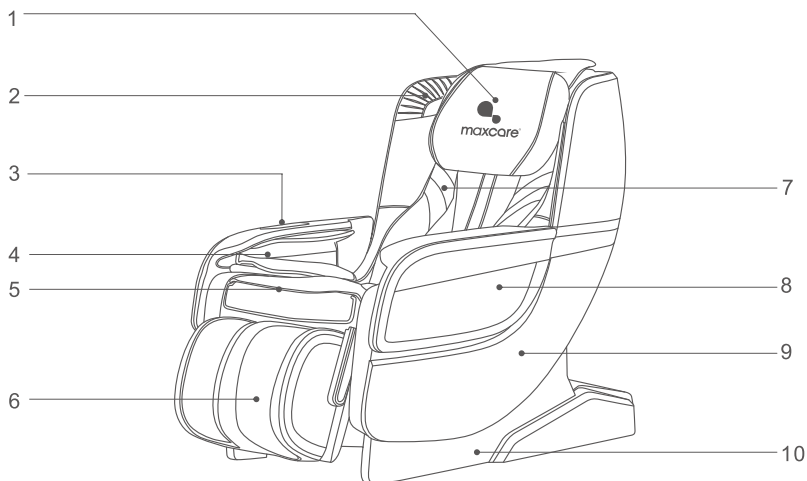

1. 头靠垫
2. 蓝牙数字音响
3. 控制器
4. 手臂气压
5. 座垫
6. 可翻转小腿架
7. 靠背垫
8. 旋转扶手
9. 扶手
10. 侧罩
11. 靠背盖
12. 电源箱盖
13. 移动滑轮
14. 电源线与插头
15. 电源线插口
16. 电源开关

15 16

机件名称及功能



功能特點：

- 本产品设计了一组能上下行走、前后伸缩、静音设计的智能按摩机械手。
- 肩部位置自动检测及微调节功能，以及人体曲线和按摩指压点自动检测功能，根据检测到的人体曲线和按摩指压点自动调节机械手前后伸缩量，使按摩更具人性化和科学性。
- 设有自动按摩模式：A1快速按摩、A2肩颈按摩、A3腰椎保健、A4摇摆按摩、A5舒适按摩、A6轻松按摩、A7全身按摩、A8运动恢复，8种自动按摩模式。
- 设有机械手动按摩部位选择：包括定点、局部、上背、下背、全背等五种按摩范围选择。
- 设有手动按摩功能：包括揉捏、拍打、揉拍、指压、敲击、3D(3D I、3D II)等七种按摩手法选择。
- 按摩速度调节功能：在揉捏、拍打、揉拍、敲击、3D(3D I、3D II)等按摩手法中设有3挡速度可调。
- 按摩宽度调节功能：在拍打、指压、敲击、3DII等按摩手法中设有宽、中、窄3挡宽度可调。
- 设定气压按摩功能：手臂 + 手掌气压按摩功能、小腿气压按摩功能，二档强度可选择。
- 设有腿部和腰部热疗功能。
- 在左右手掌气囊袋中设有凸点按摩及磁疗功能。
- 扶手设有向上(将扶手的上部分向上旋转)旋转功能，可根据自己需要调整至合适的按摩位置。
- 音乐播放系统，按摩椅肩部位置左右各设一个3D数字音响。可利用智慧设备的蓝牙功能，进行无线连接播放音乐。
- 设有小腿180°手动翻转功能，可根据自己需要选择腿部气压按摩。
- 小腿架和靠背架联动升降调节及自动躺卧模式调节功能。
- SL型超长曲线轨道贴合人体，从颈部至大腿都能享受贴身按摩，靠背下躺时呈现零重力状态。
- 关机后自动起坐功能及机械手自动复位功能。

控制版面

LED显示区

显示按摩模式和
定时时间等资讯

开关键

开启或关闭
所有按摩功能

气压切换键

开启或关闭小腿
和手臂气压切换

按摩部位键

按摩部位选择，包括全身、
上半身、下半身、局部、
定点五个部位

按摩部位下键

按摩部位向下调节选择

自动按摩键

开启/关闭自动按摩功能
(详细说明请参考此说明书
第9页)

宽度键

按摩球宽度调节，设有宽、
中、窄三档调节

起坐键


调整靠背架上升和
小腿架下降的位置

零重力键

调整按摩椅零重力角度，
设有3种模式选择(按第一下
为一档、按第二下为二档、
按第三下为三档)

3D强度

3D机械手凸出可单独调节

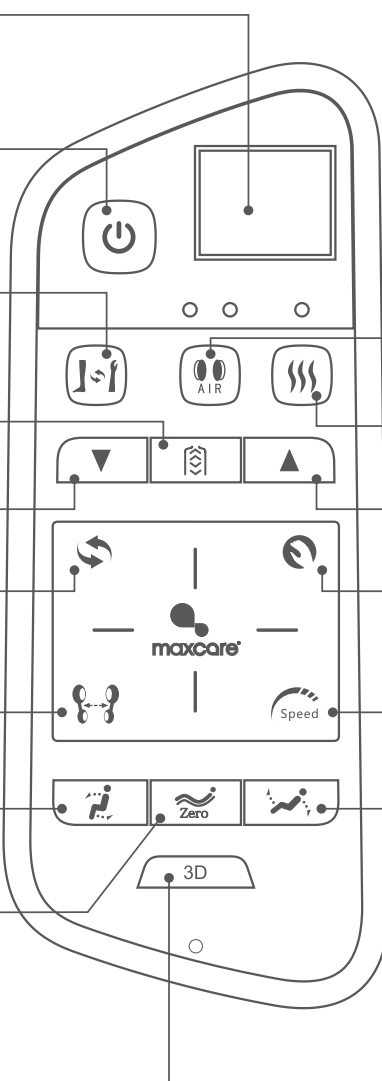

气压键

气压功能，
二档强度可选择

热疗键

开启和关闭
腿部和腰部热疗

按摩部位上键

按摩部位向上调节选择

手法键

详细说明请参考
此说明书第9页

速度键

按摩速度调节

躺卧键

调整靠背架下降和
小腿架上升的位置

注：具体显示以实物为准!

使用方法


一. 接通整机电源






二. 开始按摩

1. 按下电源开关键，启动按摩，按摩椅自动躺卧。
2. 自动体型检测，保持坐姿与按摩椅贴合。（可按按摩部位键跳过自动检测，则自动进入默认按摩程序）
3. 肩位置微调，如果检测到的位置与实际肩位置有偏差，可以透过速度键和宽度键到合适位置。（可按按摩部位键跳过）
4. 进入按摩状态，体验按摩。

A)、自动按摩：

名称	按键	描述	LED显示区状态
自动按摩		快速按摩：快速体验全部按摩功效	A1
		肩颈按摩：以颈部、肩部为重点进行按摩	A2
		腰椎保健：以腰部与臀部为重点进行按摩	A3
		摇摆按摩：自动模式伴随摇摆按摩	A4
		舒适按摩：最舒适的按摩体验	A5
		轻松按摩：轻柔舒适的深度按摩，舒缓身体疲劳	A6
		全身按摩：深度按摩，重唤身体疲劳，放松身体	A7
		运动恢复：迅速恢复运动后的身体疲劳	A8

B)、手动按摩：



名称	按键	描述	LED显示区状态
手法		揉捏：速度可调	S.1
		拍打：速度、宽度可调	S.2
		揉捏拍打：速度可调	S.3
		指压：宽度可调	S.4
		敲击：速度、宽度可调	S.5
		3D 1：速度可调	S.6
		3D 2：速度、宽度可调	S.7
宽度键		3档宽度可调整	d1, d2, d3
速度键		3档速度可调整	P1, P2, P3

使用方法


C)、按摩区域调节：

名称	按键	描述	显示状态
按摩区域		定点：固定位置定点按摩	H0
		局部：小范围局部往返按摩	H1
		上半身：上半身按摩	H2
		下半身：下半身按摩	H3
		全身：全程往返按摩	H4
向上键		按摩位置调整（在定点、局部模式下，可使用上、下按键调整按摩位置）	机械手上行
向下键			机械手下行


D)、气压按摩：

名称	按键	描述	显示状态
气压		按此键选择气压功能：弱档、强档。	显示请参考面板指示灯
气压切换		开启或关闭小腿和手臂气压切换。 q3为手臂+小腿气压；q2为小腿气压； q1为手臂气压，q0无气压。	q3, q2, q1, q0

E)、加热按摩：



名称	按键	描述	显示状态
加热		按此键开启/关闭腰部和小腿热疗功能。 h3为腰部+小腿加热；h2为小腿加热； h1为腰部加热；h0无加热。	h3, h2, h1, h0

F)、零重力：

名称	按键	描述
零重力		每按一次此键，切换一种自动躺卧模式，共三种模式，循环切换

使用方法

G)、靠背架位置调整：

名称	按键	描述
起坐键		按住此键，靠背架缓缓上升，小腿架缓缓下降，释放则停止。如果起坐到最顶，则停止上升
躺卧键		按住此键，靠背架缓缓下降，小腿架缓缓上升，释放则停止。如果靠背躺到最低，则停止下降

三、蓝牙音响播放操作说明

- 1、进入智慧设备主功能表，打开“设置”--选择“蓝牙”选项--打开“蓝牙”--蓝牙自动“搜索新的蓝牙设备”进行搜索。
- 2、智慧设备将搜索到相应的蓝牙型号(如IMCM-XXXX)，点击连接。
- 3、打开智慧设备的音乐播放机，选择歌曲进行播放。


四、关闭电源，结束按摩

- 1、在按摩过程中，按下红色开关键，立即关闭所有按摩功能，机械手复位，自动起坐复位。
- 2、按摩定时时间到(开机定时20min)，立即关闭所有按摩功能，机械手复位位置不改变。
- 3、复位完成后，切断整机电源。



五、小腿翻转方法


- 1、在使用小腿翻转功能时，先将小腿翻转到与小腿横梁管相交(卡死不能再转动)情况下(如图1)。
- 2、再将小腿往前拉5cm左右的同时再向下翻转(如图2)，小腿往回翻转时，则反之。

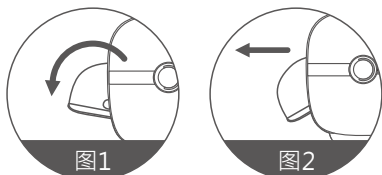

使用方法


六、抬运方法

抬运按摩椅时需要两个人配合，在按摩椅的前面和后面抬动，后面以按摩椅后罩凹槽处为着力点，前面以按摩椅小腿横梁管为着力点，两人同时抬起按摩椅。请勿直接抬动扶手。

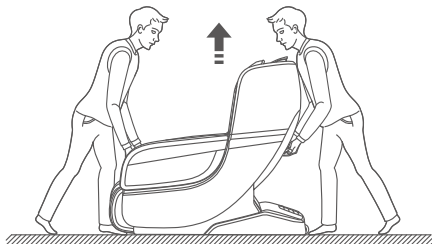

七、地板保护

由于经过按摩椅长时间的的重压，可能会对地板造成伤害，所以建议通过在按摩椅摆放处垫一张地毯或其它缓冲物料，避免这种情况发生。

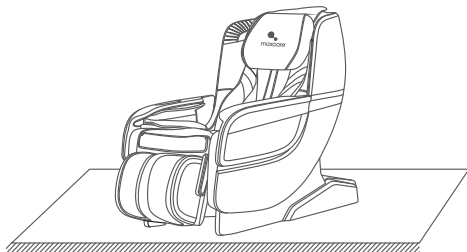

注意

在坑洼不平地面上及空间较小的地方请勿使用滑轮移动本机，如要移动必须要两个人配合，在按摩椅的前面和后面抬动，后面以按摩椅后罩凹槽处为着力点，前面以按摩椅小腿横梁管为着力点两人同时抬起按摩椅(请勿直接抬动扶手)。

八、移动方法

在移动按摩椅之前，先确定所有电源线远离地面后，靠背向下压一定角度，重心落在后滑轮上时(下压角度大约25度)，即可用手扶着将按摩椅向前推动，移动到合适位置之后将按摩椅放回正常角度。



注意

在移动时务必先关闭电源开关，再拔掉电源线及遥控器连接线。

 产品的清洁、保养

清洁

- 清洁之前，请确认电源开关已经关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 产品和控制面板的表面请用柔软的布进行擦拭清洁。



注意

- 切勿湿手拔插电源插头。
- 切勿用水冲洗产品，或将水或其它液体弄到产品内部。
- 切勿使用苯或稀释剂等具有腐蚀性的清洁剂来清洁产品，否则可能会造成产品褪色，产品结构受到腐蚀、开裂。
- 产品潮湿时，请勿拆卸或使用产品，让产品自然干燥即可。

保养

- 确认电源开关关闭，电源线插头已经从插座拔出。
- 请保持产品清洁并远离高湿度或高温的场所以及有挥发性气体的环境。
- 如果长时间不使用产品，请用防尘罩(请自行购买)套住产品，防止落入灰尘。



注意

- 切勿将产品放置于阳光直接照射或高温的场所，以免造成产品褪色及机件损坏。

温馨提示

- 长年使用时，请务必检查是否有以下症状：
 - * 有焦糊气味。
 - * 触动导线后有时通电，有时断电。
 - * 电源线发热。
 - * 电源线是否破损。
 - * 其它异常。



注意

- 如有上述现象，为防止故障和事故的发生，请停止使用产品。
- 切断电源开关，拔下电源插头，并与本公司联络。
- 切勿私自拆卸修理。

PU合成皮革的保养及清洁

PU合成皮革是由聚氨酯树脂经涂布、烘干、熟成而制成。它与真皮相比较有较好的耐酸碱、耐热、耐日光照射等属性，但由其本身物性及化学性质决定，应避免放置在有灰尘、高温、高湿、低温、强光照射及含酸碱剂液的环境中，否则易使其龟裂，加速老化与水解。

PU合成皮革的清洁方法与注意事项：

1. 不可使用有机试剂和油脂溶液及化合物，特别是强溶剂。如：酒精、松节油、天拿水等清洁PU表面，否则易腐蚀PU表面；
2. 不可使用清水或洗衣粉擦洗PU表面，易产生裂纹；
3. 应选用酸碱值：即PH值=5~7范围，不含磨擦剂，不污染环境的清洁剂清洁PU表面；
4. 对于较脏的PU表面以软布沾蛋清擦拭污垢，避免用刷子清洁；


PU合成皮革的保养方法与注意事项：

1. 要保证居室内的通风，过于干燥或潮湿都会加速皮革的老化；
2. 皮革沙发不要放在阳光能直射到的地方，也不要放在空调直接吹到的地方，否则会使皮面变硬。阳光直射会使有色的皮面褪色；
3. 夏季人体多汗，皮革的孔隙会吸收汗液，高温潮湿会使汗中的有机物与皮革发生化学反应，易产生异味。对此，要勤用带微湿的柔布擦拭；
4. 在擦沙发时，不能用碱性清洗液。因为在制皮时是酸性处理，而碱性会使皮革柔软性下降，长期使用会发生皱裂。

? 常见问题及处理方法

序号	现象	可能原因	处理方法
1	动作中出现『咻咻』、『嗒嗒』的声音	产品正常工作时发出的声音或按摩球与布套之间摩擦的声音	无需任何处理
2	无法开机	适配器接头未连接好	连接好接头
		电源开/关未开	开启电源开/关
		电源插头没有插好	插好插头
3	突然停止操作	断电	连接好接头
		按摩时间超过20分钟，自动关机	开启电源开/关
		连续使用时间过长，产品过热保护	插好插头
		施力过大，按摩球堵转	放松，减轻机器负荷

如果进行了上述处理还有异常现象，请与本公司联络。

 產品技術與參數

产品名称	: 傾心椅
产品型号	: MAX-78A161
额定电压	: 220-240V ~50/60Hz
额定功率	: 75W
额定时间	: 20分钟
噪音	: ≤55dB
产品毛重	: 73kg
产品净重	: 58.5kg
气压	: 1.5Kp
产品直立尺寸	: 107x68x100cm
产品展开尺寸	: 150x68x78cm
靠背最大承重	: 40kg
小腿架最大承重	: 20kg
安全结构	: Class I
材质	: 革 真皮 布料 木
材料說明	: PVC、PA、钢件及电气电子元器件
执行标准	: GB4706.1-2005 GB4706.10-2008